

GeneXpert® Dx 6.2 软件版本说明

本文档含有 *GeneXpert Dx 系统操作员手册* 的新信息、已知限制和澄清。

注意:

Cepheid 建议在对 GeneXpert 或主机系统进行任何更改后始终确认实验室信息系统上载的结果与 GeneXpert 测试结果相匹配, 这些更改包括 (但不限于) 对以下几项的更改:

- GeneXpert 软件版本
- GeneXpert 检测法定义版本
- GeneXpert 主机通信设置
- 主机中间件软件或配置更改
- 实验室信息系统软件或配置更改

1 创建测试

- 1.1 如果你已键入字段中, 请勿将条形码扫描到创建测试 (Create Test) 对话框的患者 ID (Patient ID) 或样品 ID (Sample ID) 字段中。将条形码键入字段中后扫描条形码会导致扫描无效的字符。要更新“患者 ID” (Patient ID) 或“样品 ID” (Sample ID) 字段, 关闭“创建测试” (Create Test) 对话框并再次选择“创建测试” (Create Test), 然后扫描 ID 条形码。
- 1.2 GX Dx 4.6 和更高版本不支持 BA 4-Plex 与 BG Duplex 检测法的组合。

2 维护

测试进行时, 不应实施柱塞维护。如果在测试期间启动柱塞维护且实施柱塞维护的模块 (注射器杆降低) 不可用而无法完成维护 (注射器杆升高), 在测试完成后, 必须重启 GeneXpert Dx 软件。

3 本地化

当 GeneXpert 软件在俄语配置下运行时, 文件选择对话框以英语显示一些文本, 而非翻译成俄语。受影响的对话框包括**归档测试 (Archive Test)** 期间的**保存 (Save)** 对话框、**检索测试 (Retrieve Test)** 期间的**打开 (Open)** 对话框、**数据库恢复 (Database Restore)** 期间的**数据库备份 (Database Backup)** 对话框和**选择文件 (Select File)** 对话框。

漏译的内容为:

- “查看” (“Look In”) - “Найти в”
- “文件名” (“File Name”) - “Имя файла”
- “文件类型” (“Files of Type”) - “Тип файлов”
- “取消” (“Cancel”) - “Отменить”
- “打开” (“Open”) - “Открыть”