

## Notas de lançamento do software Cepheid C360 Analytics v2.4

Este documento contém novas informações, limitações conhecidas e clarificações não abordadas no *Manual do administrador da instituição de Cepheid C360 Analytics*.

### Novas funcionalidades

A última versão inclui as seguintes novas funcionalidades ou melhorias:

- Ativar/desativar utilizadores manualmente e eliminar utilizadores – os administradores podem agora ativar/desativar utilizadores manualmente. Os utilizadores desativados não podem iniciar sessão no software Cepheid C360. Os utilizadores que devam ser permanentemente desativados podem agora ser eliminados para que o nome de utilizador possa ser reutilizado.
- Início de sessão com nome de utilizador – os utilizadores devem utilizar o seu nome de utilizador para iniciar sessão no software C360 (anteriormente, era utilizado o e-mail para iniciar sessão).
- Pseudónimo da instituição – o campo Pseudónimo da instituição (Institution Alias) foi adicionado à página de início de sessão para reforçar a singularidade global. O pseudónimo é definido quando a instituição é configurada pela primeira vez.
- Contas de utilizador inativas desativadas automaticamente – as contas de utilizador inativas são desativadas automaticamente após 365 dias (ou após o período de inatividade configurado).
- Os utilizadores assistentes laboratoriais não podem iniciar sessão no software C360.
- Transferência simultânea de dados de resultados de teste – o sistema processa agora vários pedidos de transferência de resultados de teste simultaneamente para melhoria do desempenho.
- Elementos da interface do utilizador não aplicáveis removidos – elementos da interface do utilizador removidos referentes à ligação ao LIS, uma vez que a funcionalidade não está disponível.
- Relatório de temperatura do pico de fusão – a temperatura do pico de fusão é agora um campo padrão na tabela Analitos (Analytes) apresentada na página de detalhes dos Resultados do teste (Test Results).

### Problemas conhecidos

#### 1. Filtro de resultados de teste

- 1.1. O filtro de Resultados do teste (Test Result) para a descrição do erro principal funciona com pesquisas por palavras completas. Pesquisas parciais de palavras podem não exibir adequadamente os resultados. Para utilizar o filtro de Resultados do teste (Test Results) para a descrição do erro principal, recomendam-se pesquisas completas por palavras.
- 1.2. O filtro Hora de Início (Start Time) da página Resultados do teste (Test Results), especificamente para a Data de hoje (Today's Date), não está a funcionar como esperado.

## Notas de lançamento do software Cepheid C360 Analytics v2.4

### 2. Páginas DCP

- 2.1. Quando um utilizador pretende adicionar uma regra a um DCP que pertence a uma Instituição (Institution) onde Ativar vigilância de doença e painel de controlo médico (Enable Disease Surveillance and Medical Dashboard) está desativado, a caixa de verificação ID da amostra (Sample ID) está desativada, mas marcada.

### 3. A transferir relatórios CSV de resultado do teste

- 3.1. Quando os relatórios CSV de resultado do teste gerados pelo utilizador contêm vários registos, os utilizadores podem observar atrasos na conclusão do relatório e o tempo de resposta do sistema pode ser atrasado. A Cepheid recomenda a seleção de uma pesquisa mais estreita para limitar o número de resultados correspondentes de cada vez. O utilizador também pode encomendar relatórios CSV em lotes de 1000 registos ou menos para melhorar o tempo de geração de relatórios.
- 3.2. O Excel apresenta incorretamente o Prazo de validade (Expiration Date) no ficheiro CSV de resultados de teste transferido. O ficheiro csv exportado (os dados em bruto) contém a cadeia de caracteres da data correta.
- 3.3. Ao selecionar Gerar relatório CSV para analitos (Generate CSV report for Analytes) e ao clicar em Transferir relatórios CSV para grandes conjuntos de dados (Download CSV Reports for large datasets), o estado parece permanecer pendente e incompleto (erro de funcionalidade do navegador).

### 4. Painel de controlo

- 4.1. As colunas da grelha de dados do painel de controlo podem sobrepor-se quando o navegador é ampliado.
- 4.2. Quando a janela é redimensionada, o texto dos meses no painel de controlo Médico (Medical) é recortado.

### 5. Contas de correio

- 5.1. Certos domínios de contas de e-mail, tais como e-mails de AOL ou Rediff, podem não receber e-mails C360 na sua caixa de entrada. Sugere-se a verificação das pastas de lixo ou spam para e-mails provenientes do C360. Além disso, se os filtros de spam sinalizarem e-mails C360, a Cepheid recomenda marcá-los como não spam.

## Notas de lançamento do software Cepheid C360 Analytics v2.4

### 6. Painel de controlo Assistência

- 6.1. Se um instrumento tiver sido movido várias vezes entre dois ou mais laboratórios, o painel de controlo Assistência (Support) apresentará um registo no local do laboratório de cada vez que o instrumento for movido. Isto fará com que o instrumento seja apresentado várias vezes sob uma localização do laboratório no painel de controlo Assistência (Support) do C360 Analytics.

### 7. Painel de controlo Médico

- 7.1. O pequeno gráfico de linhas de tendência na grelha de dados pode apresentar incorretamente resultados de teste mal-sucedidos. Todos os outros cálculos e gráficos mostrados no painel de controlo médico não incluem resultados de testes mal-sucedidos.
- 7.2. Quando um utilizador filtra por “Últimos 3 meses” (Last 3 months) e “Este trimestre” (This Quarter), é apresentado um mês extra no gráfico e no quadro abaixo do gráfico. Mesmo que os resultados do teste estejam nesse mês extra apresentado, não serão apresentados quaisquer dados fora do intervalo selecionado.

### 8. Esqueceu-se da palavra-passe

- 8.1. Quando um utilizador Admin da instituição com múltiplos perfis seleciona “Esqueceu-se da palavra-passe” e, subsequentemente, introduz uma palavra-passe inválida, o utilizador recebe uma mensagem de erro. O utilizador recebe instruções para selecionar a ligação ‘repor palavra-passe’ e iniciar sessão novamente com a palavra-passe alterada.

### 9. Atualizar utilizador recém-criado

- 9.1. Quando um utilizador Admin cria um novo utilizador e, em seguida, atualiza o novo perfil de utilizador com o primeiro e último nome, é apresentado um erro: “A ligação para o convite não é válida! Talvez tenha recebido um e-mail de convite mais recente?” (The invitation link is not valid! Maybe you received a newer invitation email?)