

# システムメンテナンスログ GeneXpert®

年および月:

最終キャリブレーションチェック日:

インストール日付:

施設名

GeneXpert シリアル番号:

使用説明:

1. 施設名、GeneXpertのシリアル番号、現在の年/月、最後にキャリブレーションをチェックした日付、インストール日付を上記のフィールドに入力します。
2. 以下にリストされた各メンテナンス作業について、その作業を実施した日付の下のボックスにチェックマークを入れ、いちばん下の行にご自分のイニシャル(最大2文字)を記入してください。
3. データの入力後、ファイルを保存します。すべての作業を記録するため、毎月、1つのファイルを保存することを推奨します。

毎日のメンテナンス	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
作業区域を清掃する																															
すべてのモジュールのドアを閉じる																															
使用済みカートリッジの廃棄																															
毎週のメンテナンスX																															
GeneXpert機器 <sup>1</sup> とコンピュータ <sup>1</sup> の電源を切る																															
ファンプレフィルタを清掃する <sup>1</sup>																															
毎月のメンテナンスX																															
テストをアーカイブする <sup>2</sup>																															
テストを消去する <sup>2</sup>																															
3か月毎のメンテナンス																															
プランジャーロッドとカートリッジベイ <sup>1</sup> を清掃する																															
機器の表面を清掃する <sup>1</sup>																															
ファンのフィルタを交換する <sup>1</sup>																															
ファンの前置フィルタを交換する <sup>1</sup>																															
毎年のメンテナンスX																															
年1回の機器のメンテナンスを確認する <sup>1</sup>																															
必要に応じ																															
システムログレポートを印刷する <sup>1</sup>																															
データベースをバックアップする <sup>2</sup>																															
I-COREブラシを使用してI-COREを清掃する <sup>1</sup>																															
テクニシャンのイニシャル(2文字)																															

1. 手順の詳細については、取扱説明書の第9章(サービスとメンテナンス)を参照してください。  
 2. 手順の詳細は、取扱説明書の6章(操作方法)を参照してください。  
 これらは清掃に関する最小限の推奨事項です。施設側がそれより頻繁にメンテナンスを行うように求めることがあります。