

# GeneXpert® Infinity 维护日志

年月:

已执行季度维护:

已执行年度维护:

机构名称

Infinity 序列号:

说明: 1. 在上面的字段中 输入您所在机构名称、GeneXpert Infinity 序列号、执行年度维护的日期、执行季度维护的日期以及当前月份和年份。

2. 对于下列每项维护工作, 勾选该月执行这些工作的日期并在最后一行输入您的姓名缩写 (最多两个字符)。

3. 输入数据后保存文件。建议每月保存一份文件, 以保留完整的工作记录。

每周维护	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
清洁自助服务终端台面、键盘和显示器 <sup>1</sup>																															
迅速清洁传送带 <sup>1</sup>																															
执行系统关闭 <sup>2</sup>																															
每月维护																															
吸尘清洁后风扇防尘海绵 <sup>1</sup>																															
存档 / 清理系统 <sup>2, 3</sup>																															
每季度维护																															
清洁自助服务终端扫描器																															
清洁传送带 <sup>1</sup>																															
清洁反应盒仓及柱塞杆 <sup>1</sup>																															
清洁仪器表面 <sup>1</sup>																															
更换并清洁风扇防尘海绵 <sup>1</sup>																															
每年维护																															
检查仪器校准情况 <sup>4</sup>																															
根据需要																															
打印系统日志和模块报告 <sup>1</sup>																															
清空 / 更换废物容器 <sup>1</sup>																															
备份数据库 <sup>2</sup>																															
清洁仪器表面 <sup>1</sup>																															
检查键盘和鼠标电池。根据需要更换 <sup>1</sup>																															
技术员姓名缩写 (两个字母)																															

1. 参考《操作员手册》第 9 章 (维修与维护) 中的详细程序。 3. 可由各个实验室确定数据管理的频率和数据存储位置。  
 2. 参考《操作员手册》第 5 章 (操作说明) 中的详细程序。 4. 将由 Cepheid 现场服务工程师或客户执行的校准检查。

这些是最低的清洁建议。您所在的机构可能需要更频繁地执行维护。  
 参考文献: 《GeneXpert Infinity 操作员手册》(P/N 302-1288-ZH-CN, 修订版 A)

