

Registro de mantenimiento de GeneXpert® Infinity

Mes y año:

Mantenimiento trimestral realizado:

Mantenimiento anual realizado:

Nombre del centro

Número de serie del Infinity

Instrucciones: 1. Introduzca el nombre de su centro, el número de serie del GeneXpert Infinity, la fecha del mantenimiento anual realizado, la fecha del mantenimiento trimestral realizado y el mes y el año en curso en los campos anteriores.

2. Para cada actividad de mantenimiento indicada a continuación, seleccione las casillas bajo el día del mes en el que se realizaron las actividades y escriba sus iniciales (2 caracteres como máximo) en la última fila.

3. Guarde el registro después de introducir los datos. Recomendamos guardar un archivo cada mes para disponer de un registro completo de las actividades.

Mantenimiento semanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpiar la parte superior de la mesa de la cabina, el teclado y el monitor ¹																															
Realizar una limpieza rápida de la cinta transportadora ¹																															
Apagar el sistema ²																															
Mantenimiento mensual																															
Aspirar los filtros de los ventiladores traseros ¹																															
Archivar / purgar pruebas ^{2,3}																															
Mantenimiento trimestral																															
Limpiar el escáner de la cabina																															
Limpiar la cinta transportadora ¹																															
Limpiar los compartimentos de los cartuchos y los vástagos de los émbolos ¹																															
Sustituir o limpiar los filtros de los ventiladores ¹																															
Limpiar las superficies del instrumento ¹																															
Mantenimiento anual																															
Comprobar la calibración del instrumento ⁴																															
Según corresponda																															
Imprimir el registro del sistema y los informes de los módulos ¹																															
Vaciar/sustituir el recipiente de residuos ¹																															
Hacer una copia de seguridad de la base de datos ²																															
Limpiar las superficies del instrumento ¹																															
Compruebe el estado de las pilas del teclado y el ratón. Sustituya cuando sea necesario ¹																															
Iniciales del técnico (dos letras)																															

1. Consulte el capítulo 9 (Servicio y mantenimiento) del manual del operador para conocer el procedimiento detallado.

2. Consulte el capítulo 5 (Instrucciones de funcionamiento) del manual del operador para conocer el procedimiento detallado.

3. Cada laboratorio puede determinar la frecuencia de la gestión de los datos y la ubicación de almacenamiento de los datos.

4. La comprobación de la calibración debe llevarla a cabo un ingeniero del servicio técnico de Cepheid o el cliente.

Estas son las recomendaciones mínimas para la limpieza. El centro puede requerir que el mantenimiento se lleve a cabo con más frecuencia.

Referencia: Manual del operador del sistema GeneXpert Infinity (REF 302-8483-ES, Rev. B).