

GeneXpert® Registro di manutenzione sistema

Mese e anno:

Data ultimo controllo calibrazione:

Data di installazione:

Nome istituto

Numero di serie GeneXpert

- Istruzioni: 1. Immettere nei campi sopra riportati il nome dell'istituto, il numero di serie di GeneXpert, il mese e l'anno correnti, la data dell'ultima verifica di calibrazione e la data di installazione.
2. Per ciascuna delle attività di manutenzione elencate sotto, spuntare la casella o le caselle corrispondenti al giorno del mese in cui le attività sono state svolte e inserire le proprie iniziali (massimo 2 caratteri) nella riga in fondo.
3. Dopo aver inserito i dati, salvare il file. Si raccomanda di salvare un file ogni mese per ottenere una registrazione completa delle attività.

Manutenzione giornaliera	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pulire l'area di lavoro																															
Chiudere tutti gli sportelli dei moduli																															
Gettare le cartucce usate																															
Manutenzione settimanale																															
Spegnere lo strumento GeneXpert e il computer ¹																															
Pulire i prefiltri delle ventole ¹																															
Manutenzione mensile																															
Archiviare le analisi ²																															
Eliminare le analisi ²																															
Manutenzione trimestrale																															
Pulire l'asta dello stantuffo e gli alloggiamenti delle cartucce ¹																															
Pulire le superfici dello strumento ¹																															
Sostituire i filtri delle ventole ¹																															
Sostituire i prefiltri delle ventole ¹																															
Manutenzione annuale																															
Verificare annualmente la manutenzione dello strumento ¹																															
A seconda delle necessità																															
Stampare il rapporto del registro di sistema ¹																															
Eseguire il backup del database ²																															
Pulire I-CORE con lo spazzolino per la pulizia I-CORE ¹																															
Iniziali del tecnico (due lettere)																															

1. Per la procedura dettagliata, consultare il Capitolo 9 (Servizio di assistenza e manutenzione) del manuale dell'operatore.
2. Per la procedura dettagliata, consultare il Capitolo 5 (Istruzioni di funzionamento) del manuale dell'operatore.
- Le presenti costituiscono le raccomandazioni minime essenziali per la pulizia. La struttura sanitaria di appartenenza può richiedere l'esecuzione di alcune operazioni di manutenzione con maggiore frequenza.