

GeneXpert® жүйесінің техникалық күтім журналы

Айы мен жылы:

Соңғы калибрлеу процесі тексерілген күн:

Орнатылған күні:

Мекеменің атауы

GeneXpert сериялық нөмірі

Нұсқаулар: 1. Жоғарыдағы жолдарға мекеменің атауын, GeneXpert сериялық нөмірін, қазіргі ай мен жылды, соңғы калибрлеу процесі тексерілген күнді және орнатылған күнін жазыңыз.

2. Төменде берілген техникалық күтім жұмыстарының әрқайсысы бойынша сол жұмыстар атқарылған айдағы жұлдыздың астындағы ұяшыққа (ұяшықтарға) құсбелгі қойып, астындағы жолға өз инициалдарыңызды (ең көбі 2 таңба) жазыңыз.

3. Деректерді енгізіп болған соң, файлды сақтаңыз. Жұмыстардың толық жазбасын жүргізу үшін ай сайын бір файл сақтаған жөн.

Күнделікті күтім	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Жұмыс аймағын тазалау																																
Модульдің барлық есіктерін жабу																																
Пайдаланылған картридждерді тастау																																
Апта сайынғы күтім																																
GeneXpert компьютері мен құралының қуатын өшіру ¹																																
Желдеткіш префильтрлерін тазалау ¹																																
Ай сайынғы күтім																																
Сынақтарды архивтеу ²																																
Сынақтарды жою ²																																
Тоқсан сайынғы күтім																																
Поршень штогын және картридж бөлімдерін тазалау ¹																																
Құралдың беттерін сүрту ¹																																
Желдеткіш фильтрлерін ауыстыру ¹																																
Желдеткіш префильтрлерін ауыстыру ¹																																
Жыл сайынғы күтім																																
Құралдың жыл сайынғы күтімін тексеру ¹																																
Қажеттілігіне қарай																																
Жүйелік журнал бойынша есепті басып шығару ¹																																
Дереккордың резервтік көшірмесін жасау ²																																
I-CORE құрылғысын I-CORE тазалау щеткасымен тазалау ¹																																
Техниктің инициалдары (екі әріп)																																

1. Толық процедураны Оператор нұсқаулығындағы 9-тараудан (Қызмет және техникалық күтім) қараңыз.

2. Толық процедураны Оператор нұсқаулығындағы 5-тараудан (Пайдалану нұсқаулары) қараңыз.

Бұлар тазалау бойынша минималды ұсыныстар. Мекемеңізде техникалық күтім жұмыстарын бұдан жиі жүргізу талап етілуі мүмкін.

Анықтамалық ақпарат: GeneXpert GX Dx оператор нұсқаулығы (бөлшек № 303-1548-KK, А редакциясы)

