

# GeneXpert<sup>®</sup> sistemos techninės priežiūros žurnalas

Metai ir mėnuo:

Paskutinės kalibravimo patikros data:

Instaliavimo data:

Įstaigos pavadinimas

GeneXpert<sup>®</sup> serijos numeris

- Instrukcijos: 1. Pirmiau pateiktuose laukuose įveskite savo įstaigos pavadinimą, „GeneXpert“ serijos numerį, einamąjį mėnesį ir metus, paskutinės kalibravimo patikros datą ir instaliavimo datą.  
 2. Atlikę kiekvieną iš toliau išvardytų techninės priežiūros darbų, ties mėnesio diena, kurią tuos darbus atlikote, pažymėkite langelį (-ius) ir tada apatinėje eilutėje įveskite savo inicialus (ne daugiau kaip 2 ženklus).  
 3. Įvedę šiuos duomenis, įrašykite failą. Rekomenduojame kruopščiai registruoti visus darbus, kas mėnesį įrašant po vieną failą.

<b>Kasdienė priežiūra</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Išvalyti darbo vietą																															
Uždaryti visų modulių dureles																															
Išmesti naudotas kasetes																															
<b>Savaitinė priežiūra</b>																															
Išjungti „GeneXpert“ kompiuterį ir prietaisą <sup>1</sup>																															
Išvalyti ventiliatoriaus priešfiltrus <sup>1</sup>																															
<b>Mėnesinė priežiūra</b>																															
Archyvuoti tyrimus <sup>2</sup>																															
Naikinti tyrimus <sup>2</sup>																															
<b>Ketvirtinė priežiūra</b>																															
Išvalyti stūmoklių strypus ir kasečių skyrelius <sup>1</sup>																															
Nuvalyti prietaiso paviršius <sup>1</sup>																															
Pakeisti ventiliatoriaus filtrus <sup>1</sup>																															
Pakeisti ventiliatoriaus priešfiltrus <sup>1</sup>																															
<b>Metinė priežiūra</b>																															
Atlikti metinę prietaiso techninės būklės patikrą <sup>1</sup>																															
<b>Pagal reikmę</b>																															
Spausdinti sistemos techninės priežiūros ataskaitą <sup>1</sup>																															
Padaryti atsarginę duomenų bazės kopiją <sup>2</sup>																															
I-CORE šepetėliu išvalyti I-CORE <sup>1</sup>																															
Specialisto inicialai (dvi raidės))																															

1. Darbo eiga išsamiai aprašyta operatoriaus vadovo 9 skyriuje („Techninė ir eksploatacinė priežiūra“).

2. Procesas išsamiai aprašytas operatoriaus vadovo 5 skyriuje („Naudojimo instrukcijos“).

Šios rekomendacijos apima tik būtinausius valymo darbus. Pagal įstaigoje nustatytus reikalavimus techninę priežiūrą gali tekti atlikti dažniau.

Nuoroda: „GeneXpert GX Dx“ operatoriaus vadovas (P/N 303-1548-LT, A red.)