

# Onderhoudslogboek GeneXpert<sup>®</sup> systeem

Maand en jaar:

Datum laatste kalibratiecontrole:

Installatiedatum:

Naam instelling

GeneXpert-serienummer

- Instructies:**
1. Voer de naam van uw instelling, het GeneXpert-serienummer, de huidige maand en het huidige jaar, de datum van de laatste kalibratiecontrole en de installatiedatum in de bovenstaande velden in.
  2. Vink voor elke hieronder vermelde onderhoudswerkzaamheid het vakje/de vakjes aan onder de dag van de maand waarop de werkzaamheden zijn verricht en voer uw initialen (maximaal 2 tekens) op de onderste regel in.
  3. Sla het bestand op nadat u de gegevens hebt ingevoerd. Wij adviseren om elke maand één bestand op te slaan, met het oog op een complete administratie van de werkzaamheden.

<b>Dagelijks onderhoud</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Werkgebied reinigen																															
Alle moduledeuren sluiten																															
Gebruikte patronen wegwerpen																															
<b>Wekelijks onderhoud</b>																															
GeneXpert-computer en -instrument uitschakelen <sup>1</sup>																															
Ventilatorvoorfilters reinigen <sup>1</sup>																															
<b>Maandelijks onderhoud</b>																															
Tests archiveren <sup>2</sup>																															
Tests opschonen <sup>2</sup>																															
<b>Driemaandelijks onderhoud</b>																															
Plunjerstang en patroonhouders reinigen <sup>1</sup>																															
Oppervlakken instrument reinigen <sup>1</sup>																															
Ventilatorfilters vervangen <sup>1</sup>																															
Ventilatorvoorfilters vervangen <sup>1</sup>																															
<b>Jaarlijks onderhoud</b>																															
Jaarlijks instrumentonderhoud controleren <sup>1</sup>																															
<b>Wanneer vereist</b>																															
Systeemlograpport afdrukken <sup>1</sup>																															
Back-up van database maken <sup>2</sup>																															
I-CORE reinigen met I-CORE reinigingsborstel <sup>1</sup>																															
Initialen technicus (twee letters)																															

1. Zie hoofdstuk 9 (Reparaties en onderhoud) van de bedieningshandleiding voor de details van de procedure.

2. Zie hoofdstuk 5 (Bedieningsinstructies) van de bedieningshandleiding voor de details van de procedure.

Dit zijn minimale aanbevelingen voor reiniging. Mogelijk schrijft uw instelling voor dat er vaker onderhoud moet worden uitgevoerd.

Literatuur: Bedieningshandleiding GeneXpert GX Dx (artikelnr. 303-1548-NL Rev. A)