

# GeneXpert<sup>®</sup> -systemets vedlikeholdslogg

Måned og år:

Dato for siste kalibreringskontroll:

Installasjonsdato:

Institusjonens navn

GeneXpert-serienummer

## Instructions:

1. Angi navnet på institusjonen, GeneXpert-serienummeret, gjeldende måned og år, dato for siste kalibreringskontroll og installasjonsdato i feltene ovenfor.
2. Merk av i boksene under dagen i måneden som aktivitetene ble utført, for hver vedlikeholdsaktivitet oppført nedenfor, og skriv inn initialene dine (maks. 2 tegn) i den nederste raden.
3. Lagre filen etter at du har lagt inn dataene. Vi anbefaler å lagre én fil hver måned for en fullstendig registrering av aktiviteter.

Daglig vedlikehold	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Rengjør arbeidsområdet																																
Lukk alle modullukene																																
Kast brukte patroner																																
<b>Ukentlig vedlikehold</b>																																
Slå av GeneXpert-instrumentet <sup>1</sup> og datamaskinen <sup>1</sup>																																
Rengjøre vifteforfiltre <sup>1</sup>																																
<b>Månedlig vedlikehold</b>																																
Arkiver tester <sup>2</sup>																																
Tøm tester <sup>2</sup>																																
<b>Kvartalsvis vedlikehold</b>																																
Rengjør stempelstangen og patronsporene <sup>1</sup>																																
Rengjør instrumentoverflatene <sup>1</sup>																																
Skift viftefiltre <sup>1</sup>																																
Skift vifteforfiltre <sup>1</sup>																																
<b>Årlig vedlikehold</b>																																
Kontroller årlig instrumentvedlikehold <sup>1</sup>																																
<b>Etter behov</b>																																
Skriv ut systemloggrapport <sup>1</sup>																																
Sikkerhetskopier databasen <sup>2</sup>																																
Rengjør I-CORE med I-CORE-rengjøringsbørsten <sup>1</sup>																																
Teknikerens initialer (to bokstaver)																																

1. Se kapittel 9 (Service og vedlikehold) i brukerhåndboken for detaljert prosedyre.

2. Se kapittel 5 (Instruksjoner for bruk) i brukerhåndboken for detaljert prosedyre.

Dette er minimumsanbefalinger for rengjøring. Institusjonen kan kreve at vedlikehold utføres oftere.

Brukerhåndboken for GeneXpert-systemet (P/N 303-1548-NO Rev. A)