

Registo de manutenção do sistema GeneXpert®

Mês e ano:

Data da última verificação da calibração:

Data da instalação:

Nome da instituição

Número de série do GeneXpert

Instruções:

1. Introduza, nos campos acima, o nome da sua instituição, número de série do GeneXpert, mês e ano atuais, data da última verificação da calibração e data da instalação.
2. Para cada atividade de manutenção abaixo, marque a(s) caixa(s) sob o dia do mês em que as atividades foram executadas e introduza as suas iniciais (máximo de 2 caracteres) na linha abaixo.
3. Guarde o ficheiro depois de introduzir a data. Recomenda-se guardar um ficheiro a cada mês para um registo completo das atividades.

Manutenção diária	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpar a área de trabalho																															
Fechar todas as portas dos módulos																															
Eliminar cartuchos usados																															
Manutenção semanal																															
Desligar o instrumento GeneXpert ¹ e o computador ¹																															
Limpar os pré-filtros da ventoinha ¹																															
Manutenção mensal																															
Arquivar testes ²																															
Purgar testes ²																															
Manutenção trimestral																															
Limpar a haste do êmbolo e os compartimentos do cartucho ¹																															
Limpar as superfícies do instrumento ¹																															
Substituir os filtros da ventoinha ¹																															
Substituir os pré-filtros da ventoinha ¹																															
Manutenção anual																															
Verificar a manutenção anual do instrumento ¹																															
Conforme necessário																															
Imprimir relatório de registos do sistema ¹																															
Efectuar uma cópia de segurança da base de dados ²																															
Limpar o I-CORE utilizando a escova de limpeza I-CORE ¹																															
Iniciais do técnico (duas letras)																															

1. Consulte o procedimento detalhado no Capítulo 9 (Assistência e manutenção) do manual do utilizador.
 2. Consulte o procedimento detalhado no Capítulo 5 (Instruções de funcionamento) do manual do utilizador.
- Estas são recomendações mínimas quanto à limpeza. A sua instituição pode exigir que a manutenção seja efetuada com maior frequência.

Referência: Manual do utilizador do GeneXpert (Refª 303-1548-PT Rev. A)

