

Журнал обслуживания системы GeneXpert®

Месяц и год:

Дата последнего контроля калибровки:

Дата установки:

Наименование учреждения

Серийный номер GeneXpert

Инструкция: 1. Укажите в ячейках выше наименование вашего учреждения, серийный номер GeneXpert, текущие месяц и год, дату последнего контроля калибровки и дату установки.

2. Для операций обслуживания, указанных ниже, установите флажок(-ки) в день месяца, когда эти операции были выполнены, и укажите ваши инициалы (максимум, 2 символа) в нижнем ряду.

3. Сохраните файл после ввода данных. Для полной регистрации деятельности мы рекомендуем сохранять файл ежемесячно.

Ежедневное техническое обслуживание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Очистка рабочего места																															
Закройте дверцы всех модулей																															
Удаление использованных картриджей в отходы																															
Еженедельное техническое обслуживание																															
Выключить прибор GeneXpert и компьютер ¹																															
Очистить предфильтры вентилятора ¹																															
Ежемесячное техническое обслуживание																															
Архивирование тестов ²																															
Удаление тестов ²																															
Ежеквартальное обслуживание																															
Очистить шток поршня и отсеки для картриджей ¹																															
Очистить поверхности прибора ¹																															
Замена фильтров вентилятора ¹																															
Заменить предфильтры вентилятора ¹																															
Ежегодное обслуживание																															
Проверка ежегодного обслуживания прибора ¹																															
По мере необходимости																															
Распечатать отчет по системному журналу ¹																															
Выполнить резервное копирование базы данных ²																															
Очистить I-CORE щеткой I-CORE ¹																															
Инициалы технического специалиста (две буквы)																															

1. Для подробного описания процедуры обратитесь к Главе 9 (Сервис и техническое обслуживание) Руководства оператора.

2. Для подробного описания процедуры обратитесь к Главе 5 (Инструкции по применению) в Руководстве оператора.

Эти рекомендации по чистке являются минимальными. Правила вашего учреждения могут требовать более частого выполнения технического обслуживания.

Справочная литература: руководство оператора системы GeneXpert (каталожный номер 303-1548-RU, ред. А)