

Nhật ký bảo trì Hệ thống GeneXpert®

Tháng và năm:

Ngày kiểm tra hiệu chuẩn cuối cùng:

Ngày lắp đặt:

Tên tổ chức

Số sê-ri GeneXpert

Hướng dẫn:

1. Nhập tên tổ chức của bạn, Số sê-ri GeneXpert, Tháng và năm hiện tại, Ngày kiểm tra hiệu chuẩn cuối cùng và Ngày cài đặt vào các trường ở trên.
2. Đối với mỗi hoạt động bảo trì được liệt kê dưới đây, hãy đánh dấu vào (các) ô dưới ngày trong tháng mà các hoạt động được thực hiện và nhập chữ ký tắt của bạn (tối đa 2 ký tự) ở hàng dưới cùng.
3. Lưu tập tin sau khi nhập dữ liệu. Chúng tôi khuyến nghị lưu một tập tin mỗi tháng để có bản ghi đầy đủ về các hoạt động.

Bảo trì hàng ngày	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Làm sạch khu vực làm việc																																
Đóng tất cả các cửa mô-đun																																
Vứt bỏ hộp xét nghiệm đã sử dụng																																
Bảo trì hàng tuần																																
Tắt nguồn thiết bị GeneXpert ¹ và máy tính ¹																																
Làm sạch bộ lọc sơ bộ của quạt ¹																																
Bảo trì hàng tháng																																
Lưu trữ xét nghiệm ²																																
Xóa hoàn toàn xét nghiệm ²																																
Thay bộ lọc của quạt ¹																																
Thay bộ lọc sơ bộ của quạt ¹																																
Bảo trì hàng quý																																
Làm sạch tay đẩy pít tông và khoang chứa hộp xét nghiệm ¹																																
Làm sạch các bề mặt máy ¹																																
Bảo trì hàng năm																																
Kiểm tra bảo trì máy hàng năm ¹																																
Khi cần thiết																																
In báo cáo nhật ký Hệ thống ¹																																
Sao lưu cơ sở dữ liệu ²																																
Làm sạch I-CORE bằng cách sử dụng bàn chải làm sạch I-CORE																																
Chữ ký tắt của kỹ thuật viên (hai chữ cái)																																

1. Tham khảo Chương 9 (Bảo dưỡng và bảo trì) trong Hướng dẫn vận hành để biết quy trình chi tiết.
 2. Tham khảo Chương 5 (Hướng dẫn vận hành) trong Hướng dẫn vận hành để biết quy trình chi tiết.
- Đây là những khuyến nghị tối thiểu về việc làm sạch. Tổ chức của bạn có thể yêu cầu thực hiện bảo trì thường xuyên hơn.

Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn vận hành GeneXpert GX Dx (303-1548-VI, Bản sửa đổi A)