

## GeneXpert® Dx 6.4 软件版本说明

本文档含有 *GeneXpert Dx 系统操作员手册* 的新信息、已知限制和澄清。

### 新功能

最新版本包含以下新功能或改进：

- 新的结果产生时间 (TTR) 算法 - 新的结果产生时间算法专门针对包含可变命令序列的 Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV (EUA) 和 Xpert Xpress CT/NG 检测法，此算法可使总测定时间的表示更准确。
- 主机查询消息或查询取消不会写入主机通信缓冲区。

### 已知问题

#### 注意：

Cepheid 建议在对 GeneXpert 或主机系统进行任何更改后始终确认实验室信息系统上载的结果与 GeneXpert 检测结果相匹配，这些更改包括（但不限于）对以下几项的更改：

- GeneXpert 软件版本
- GeneXpert 检测法定义版本
- GeneXpert 主机通信设置
- 主机中间件软件或配置更改
- 实验室信息系统软件或配置更改

### 创建检测 (Create Test)

1. 如果已在字段中键入，请勿将条形码扫描到创建检测 (Create Test) 对话框的患者 ID (Patient ID) 或样品 ID (Sample ID) 字段中。将条形码键入字段后扫描条形码会导致扫描无效的字符。要更新患者 ID (Patient ID) 或样品 ID (Sample ID) 字段，关闭创建检测 (Create Test) 对话框并再次选择创建检测 (Create Test)，然后扫描 ID 条形码。
2. GX Dx 4.6 和更高版本不支持 BA 4-Plex 与 BG Duplex 检测法的组合。

### 数据库转换

1. 可以通过执行以下操作缓解数据库迁移问题：
  - 运行安装程序并选择“自定义安装” (Custom Install)
  - 在“自定义安装” (Custom Install) 屏幕上选择“清理数据库” (Clean Database)
  - 按照屏幕上的说明完成软件的安装。
2. 联系 Cepheid 技术支持部门转换和恢复数据库。

## GeneXpert® Dx 6.4 软件版本说明

### 本地化 (Localization)

当 GeneXpert 软件在俄语配置下运行时，文件选择对话框以英语显示一些文本，而非翻译成俄语。受影响的对话框包括归档检测期间的**保存 (Save)** 对话框、检索检测 (Retrieve Test) 期间的**打开 (Open)** 对话框、数据库恢复 (Database Restore) 期间的数据库备份 (Database Backup) 对话框和**选择文件 (Select File)** 对话框。

缺失的翻译有：

“Look In” - "Найти в"

“File Name” - "Имя файла"

“Files of Type” - "Тип файлов"

“Cancel” - "Отменить"

“Open” - "Открыть"