

# GeneXpert® System with Touchscreen Maintenance Log

Mois et année :

Date de la dernière

vérification de l'étalonnage :

Date d'installation par l'ingénieur

d'application sur le terrain (IAT) :

Nom de l'établissement

Numéro de série du GeneXpert

Instructions : 1. Saisissez le nom de votre établissement, le numéro de série du GeneXpert, le mois et l'année en cours, la date de la dernière vérification de l'étalonnage et la date d'installation par l'ingénieur d'application sur le terrain (IAT) dans les champs ci-dessus.

2. Pour chaque activité de maintenance indiquée ci-dessous, cocher la ou les cases correspondant au jour du mois où les activités ont été effectuées et inscrire les initiales (2 caractères au maximum) dans la ligne du bas.

3. Enregistrer le fichier après avoir saisi les données. Nous recommandons d'enregistrer un fichier chaque mois pour disposer d'un dossier complet des activités.

Maintenance quotidienne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Nettoyer la zone de travail																															
Fermer toutes les portes des modules																															
Jeter les cartouches usagées																															
<b>Maintenance hebdomadaire</b>																															
Éteindre le système GeneXpert <sup>1</sup>																															
Mettre l'écran tactile hors tension <sup>1</sup>																															
Nettoyer les filtres du ventilateur																															
<b>Maintenance mensuelle</b>																															
Archiver les tests <sup>2</sup>																															
Purger les tests <sup>2</sup>																															
<b>Maintenance trimestrielle</b>																															
Nettoyer la tige de piston et les socles de cartouche <sup>1</sup>																															
Nettoyer les surfaces de l'instrument <sup>1</sup>																															
Remplacer les filtres du ventilateur de l'instrument <sup>1</sup>																															
<b>Maintenance annuelle</b>																															
Vérifier la maintenance annuelle de l'instrument <sup>1</sup>																															
<b>Selon les besoins Selon les besoins Selon les besoins</b>																															
Nettoyer le module I-CORE® en utilisant la brosse de nettoyage I-CORE <sup>1</sup>																															
Imprimer le rapport de journal système (system log report) <sup>1</sup>																															
Sauvegarder la base de données <sup>2</sup>																															
Initiales du technicien (deux lettres)																															

1. Consulter le chapitre 9 (Révision et maintenance) dans le manuel d'utilisation pour des détails sur la procédure.

2. Consulter le chapitre 5 (Consignes d'utilisation) dans le manuel d'utilisation pour des détails sur la procédure.

Ces recommandations sont les recommandations minimales pour le nettoyage. L'établissement en question pourrait exiger que la maintenance soit effectuée sur une base plus fréquente.