

Dziennik konserwacji systemu GeneXpert® z ekranem dotykowym

Miesiąc i rok:

Data ostatniego sprawdzenia wzorcowania:

Nazwa instytucji

Numer seryjny aparatu GeneXpert

Data instalacji FAS:

- Instrukcje:** 1. W powyższych polach wprowadzić nazwę instytucji, numer seryjny aparatu GeneXpert, bieżący miesiąc i rok, datę ostatniego sprawdzenia wzorcowania oraz datę instalacji.
2. W odniesieniu do każdej czynności konserwacyjnej wymienionej poniżej należy zaznaczyć odpowiednie pole (pola) pod dniem miesiąca, w którym czynności zostały przeprowadzone oraz parafować (nie więcej niż dwie litery) w dolnym wierszu.
3. Po wprowadzeniu danych plik zapisać. Zalecamy zapisywanie jednego pliku dla każdego miesiąca, aby zapewnić pełną dokumentację czynności.

Konserwacja codzienna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Wyczyścić obszar roboczy																																
Zamknąć drzwiczki wszystkich modułów																																
Wyrzucić zużyte kartridże																																
Konserwacja tygodniowa																																
Wyłączyć aparat GeneXpert ¹																																
Wyłączyć ekran dotykowy ¹																																
Wyczyścić filtry wentylatora aparatu																																
Konserwacja miesięczna																																
Zarchiwizować testy ²																																
Wyczyścić testy ²																																
Konserwacja kwartalna																																
Wyczyścić tłok i wnęki kartridży ¹																																
Wyczyścić powierzchnie aparatu ¹																																
Wymienić filtry wentylatora aparatu ¹																																
Konserwacja roczna																																
Sprawdzić doroczne czynności konserwacyjne aparatu ¹																																
Zgodnie z potrzebami																																
Wyczyścić modułu I-CORE® przy użyciu szczotki I-CORE ¹																																
Wydrukować raport systemowy ¹																																
Utworzyć kopię zapasową bazy danych ¹																																
Inicjały technika (dwie litery)																																

1. Dokładna procedura znajduje się w rozdziale 9 (Serwisowanie i czynności konserwacyjne) instrukcji obsługi.

2. Dokładna procedura znajduje się w rozdziale 5 (Instrukcja obsługi) instrukcji obsługi.

Są to minimalne wymagania dotyczące czyszczenia. Dana instytucja może wymagać częstszego wykonywania czynności konserwacyjnych.