

# Registro de mantenimiento del sistema GeneXpert® con pantalla táctil

Mes y año:

Fecha de la última

comprobación de calibración:

Fecha de instalación por el

especialista de aplicaciones de campo:

Nombre del centro

Número de serie de GeneXpert

Instrucciones: 1. Introduzca el nombre de su centro, el número de serie de GeneXpert, el mes y el año actuales, la fecha de la última comprobación de la calibración y la fecha de instalación por el FAS en los cuadros mostrados más arriba.

2. Para cada actividad de mantenimiento indicada a continuación, seleccione las casillas bajo el día del mes en el que se realizaron las actividades e introduzca sus iniciales (2 caracteres como máximo) en la última fila.

3. Guarde el registro después de introducir los datos. Recomendamos guardar un archivo cada mes para disponer de un registro completo de las actividades

Mantenimiento diario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpiar el área de trabajo																															
Cerrar todas las puertas de los módulos																															
Desechar los cartuchos usados																															
<b>Mantenimiento semanal</b>																															
Apagar el instrumento GeneXpert <sup>1</sup>																															
Apagar la pantalla táctil <sup>1</sup>																															
Limpiar los filtros de los ventiladores del instrumento																															
<b>Mantenimiento mensual</b>																															
Almacenar las pruebas <sup>2</sup>																															
Purgar las pruebas <sup>2</sup>																															
<b>Mantenimiento trimestral</b>																															
Limpiar el vástago del émbolo y los compartimentos de los cartuchos <sup>1</sup>																															
Limpiar las superficies del instrumento <sup>1</sup>																															
Sustituir los filtros de los ventiladores del instrumento <sup>1</sup>																															
<b>Mantenimiento anual</b>																															
Realizar el mantenimiento anual del instrumento <sup>1</sup>																															
<b>Según corresponda</b>																															
Limpiar el I-CORE® Module con el cepillo de limpieza del I-CORE <sup>1</sup>																															
Imprimir el informe de registro del sistema <sup>1</sup>																															
Hacer una copia de seguridad de la base de datos <sup>2</sup>																															
Iniciales del técnico (dos letras)																															

1. Consulte el capítulo 9 (Servicio y mantenimiento) del manual del operador para conocer el procedimiento detallado.

2. Consulte el capítulo 5 (Instrucciones de funcionamiento) del manual del operador para conocer el procedimiento detallado.

Estas son las recomendaciones mínimas para la limpieza. El centro puede requerir que el mantenimiento se lleve a cabo con más frecuencia.

Referencia: Manual del operador del sistema GeneXpert con pantalla táctil (n.º de referencia 302-5302, Rev. A)

© 2022 Cepheid

302-5481-ES Rev. A Marzo de 2022

