

## Skapa ett test

På START-skärmen, peka på **NYTT TEST (NEW TEST)**. Följ uppmaningar för att ange testinformation och ladda kassett.

NEW TEST

## Granska resultat och rapport


1. Peka på fliken **RESULTAT (RESULTS)**.
2. Välj vilka test som ska granskas.
3. Peka på **RAPPORT (REPORT)** för att granska ett test.
4. Peka på **Spara (Save)** för att spara en rapport.
5. Peka på **Skriv ut (Print)** för att skriva ut en rapport.

REPORT

## Stänga av systemet

OBS: Starta om systemet efter behov eller enligt det veckovisa underhållsschemat. När du gör detta, säkerställ att inga tester körs.

1. Peka på Windows startmeny, peka på strömbrytarikonen och välj **Stäng av (Shut Down)**.
2. Vänta i cirka 10 sekunder på att Microsoft Windows stänger av och peka på strömbrytaren på pekskärmens baksida.
3. Peka på strömbrytaren på baksidan av GeneXpert II-instrumentet.

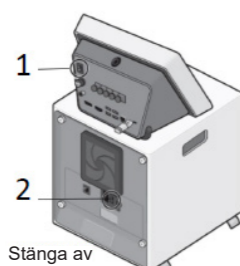

## Rengöra kolvstavar och fack

Frekvens: Varje kvartal

Se användarmanualen för detaljerade instruktioner.

1. Peka på **ADMIN > Instrument > Kolvstavsunderhåll (Plunger Rod Maintenance)**.
2. Välj modul(er), peka på **RENGÖR (CLEAN)**.
3. Fukta en luddfri torkduk med blekmedelslösning för hushållsbruk i utspädning 1:10. Torka av kolvstången och hela kassettfackets insida med utspätt blekmedel 3 gånger och låt blekmedlet sitta kvar i 2 minuter varje gång.
4. Fukta den luddfria torkduken med 70 % etanol eller denaturerad etanol. Torka av kolvstången och hela kassettfackets med etanollösningen för att avlägsna blekmedelsrester.
5. För upp kolven och peka på **AVSLUTA (COMPLETE)**.

## Importera Assay Definition Files

(om tillämpligt)

Importera ADF:er från den bifogade CD:n. Vissa kan hämtas från webbsidan för Cepheid.

1. Hämta pekskärmens ADF.
2. Peka på **ADMIN**, sedan **HANTERA ASSAYER (MANAGE ASSAYS)**.
3. Peka på **IMPORTERA ASSAY (IMPORT ASSAY)**.
4. Navigera till ADF-filen. Peka på **Öppna (Open)**.

IMPORT ASSAY

## Arkivera och rensa

Frekvens: Arkivera och rensa efter behov enligt ditt veckovisa underhållsschema.

1. Peka på fliken **ADMIN**.
2. Peka på **ARKIVERA TESTER (ARCHIVE TESTS)**.
3. Peka på **Välj alla (Select All)** eller välj individuella test som ska arkiveras eller tas bort.  
Valfritt:  
Välj **Rensa valda test från lista efter arkivering (Purge Selected Tests from List after Archiving)** om så önskas.  
**Dölj ID:er (Cloak IDs)** för att dölja känslig patientinformation.
4. Peka på **ARKIVERA (ARCHIVE)** för att arkivera filerna till en förvaringsplats.

Se användarmanualen till GeneXpert-systemet med pekskärm eller assayens bruksanvisning för detaljerad information.

Hämta en översatt version av denna guide från den bifogade CD:n.

## Teknisk assistans

Innan du kontaktar Cepheid teknisk support, samla in:

- produktnamn
- lotnummer för kassett och reagens
- systemets serienummer
- felmeddelanden
- mjukvarans version.

Logga ett supportärende online:

<http://www.cepheid.com/support>.

### USA

Tel.: +1 888 838 3222

techsupport@cepheid.com

### Frankrike

Tel.: +33 563 825 319

support@cepheideurope.com



Snabbstartguide

# GeneXpert®-system med pekskärm



302-5482-SV Rev. A Mars 2022

CORPORATE HEADQUARTERS EUROPEAN HEADQUARTERS www.Cepheidinternational.com

904 Caribbean Drive  
Sunnyvale, CA 94089 USA

Vira Soleth  
81470 Maurens-Scopont France

TOLL FREE +1.888.336.2743  
PHONE +1.408.541.4191  
FAX +1.408.541.4192

PHONE +33.563.82.53.00  
FAX +33.563.82.53.01  
EMAIL cepheid@cepheideurope.fr

© 2022 Cepheid


1

## Packa upp, placera och ansluta

Placera instrumentet på en hård, fast, jämn yta.

⚠ Undvika att placera flera instrument nära varandra eller nära ventilering. Säkerställ minsta fria utrymme på 5 cm (2 tum).


1. Anslut elkablarna (1, 2 och 4).
2. Vrid silverkopplingen försiktigt medurs för att sätta fast elsladden.
3. Anslut den blåa nätverkskabeln (3) från instrumentet till "Nätverksporten" ("Network") på pekskärmen.
4. Sätt på GeneXpert-instrumentet.
5. Sätt på pekskärmen.

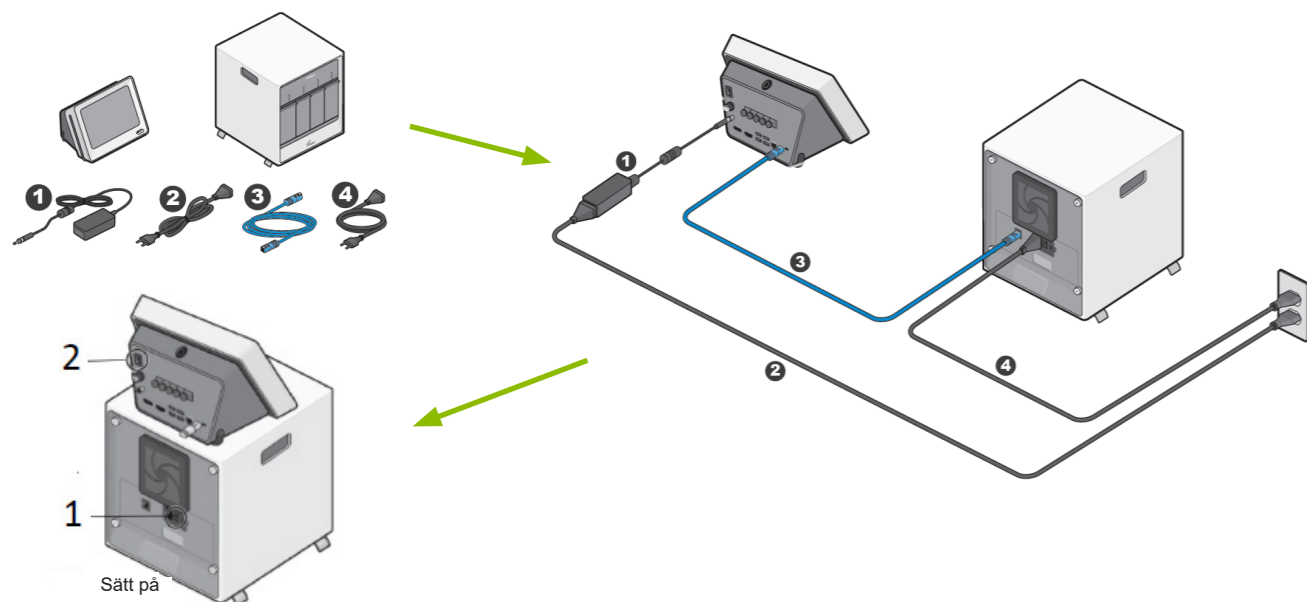

2

## Logga in och byt namn på enhet

1. Svep uppåt på Windows-skärmen och ange det fabriksinställda lösenordet: **cphd**.
2. Cepheid OS-mjukvaran startar och frambringar databashanteringssuppgifter. Peka på **Nej (No)**.
3. Peka på **ADMIN**, sedan **Allmänna inställningar (General Settings)**.
4. Peka på **Redigera (Edit)** och ge systemet ett nytt namn. (Platsnamn och serienummer rekommenderas.)
5. Välj **Logga in med inrättnings-ID (Login with Institutional ID)** för att aktivera ID-scanning.

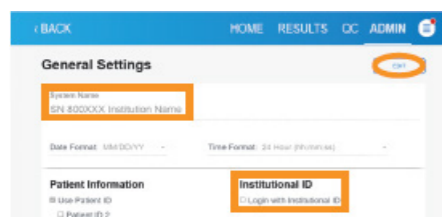


3

## Lägga till Admin och Grundläggande användare

### För att lägga till lokalt:

1. Peka på **ADMIN**, sedan **ANVÄNDARE (USERS)**.
2. Peka på **Lägga till användare (Add User)**.
3. Definiera en Admin-användare.
4. Klicka på **Bekräfta (Confirm)**.
5. Klicka på **Lägga till användare** (Lägg till användare) flera gånger för att lägga till flera.

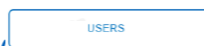

### För att lägga till användare inom datahanteringssystemet:

Se användarmanualen.

4

## Ställa in inställningar för QC-utestängning


1. Peka på **ADMIN**, sedan **INSTÄLLNINGAR FÖR QC-UTESTÄNGNING (QC LOCKOUT SETTINGS)**.
2. Konfigurera inställningar för QC-utestängning enligt kraven från din inrättning.
3. Peka på **Bekräfta (Confirm)**.



6

## Avsluta Cepheid OS/logga in på Windows

1. Avsluta Cepheid OS-mjukvaran.
2. Peka på **Användarmeny (User Menu) > Avsluta (Exit)**.

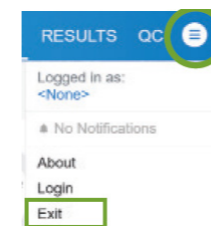

8

## Ansluta till nätverk

Två alternativ för anslutning till intranet på din inrättning:

### Wi-Fi

1. För in den bifogade Wi-Fi-adaptorn i en USB-port på pekskärmens baksida.
2. Välj en Wi-Fi-signal. Installera en drivenhet om så behövs.

### Ethernet

1. För in en ethernetkabeln i porten "Network" (Nätverk) på baksidan av pekskärmen.

5

## Installationskvalificeringsrapport

1. Så snart installationen är klar, peka på **ADMIN**, sedan **RAPPORTER (REPORTS)**.
2. Peka på **INSTALLATIONSKVALIFIKATION (INSTALLATION QUALIFICATION)** för att generera, underteckna och spara en rapport.



7

## Ställ in datum, tid och språk (om tillämpligt)

1. Klicka på och håll ikonen Windows Start nedtryckt och välj **Inställningar (Settings)**.
2. Peka på **Tid och språk (Time & Language)**.
3. Peka på **Språk (Language)**, sedan **Lägga till ett språk (Add a Language)**.
4. Välj **Språk (Language)** och peka på **Installera (Install)**.
5. Välj **Datum och tid (Date & Time)**.
6. Välj din tidszon.
7. Starta om pekskärmen.

