

GeneXpert[®] systemvedligeholdelseslog

Måned og år:

Dato for sidste kalibreringskontrol:

Installationsdato:

Institutionens navn

GeneXpert-serienummer

- Vejledning:
1. Angiv navnet på din institution, GeneXpert-serienummer, aktuel måned og år, dato for sidste kalibreringskontrol og installationsdato i felterne ovenfor.
 2. Markér feltet/felterne for hver vedligeholdelsesaktivitet, der er angivet nedenfor, under den dag i måneden, hvor aktiviteterne blev udført, og anfør dine initialer (højest 2 tegn) i den nederste række.
 3. Gem filen efter indtastning af dataene. Vi anbefaler at gemme en fil hver måned for at få en komplet oversigt over aktiviteterne.

Daily Maintenance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Rengøring af arbejdsområdet																																				
Lukning af alle modullåger																																				
Bortskaffelse af brugte kassetter																																				
Ugentlig vedligeholdelse																																				
Lukning GeneXpert-instrument ¹ og computeren ¹																																				
Rengøring af ventilators forfiltre ¹																																				
Månedlig vedligeholdelse																																				
Arkivering af tests ²																																				
Udrensning af tests ²																																				
Kvartalsvis vedligeholdelse																																				
Rengøring af stempelstang og kassetterum ¹																																				
Rengøring af instrumentflader ¹																																				
Udskiftning af ventilatorfiltre ¹																																				
Udskiftning af ventilators forfiltre ¹																																				
Årlig vedligeholdelse																																				
Markér årlig instrumentvedligeholdelse																																				
Efter behov																																				
Udskrivning af systemlograpport ¹																																				
Sikkerhedskopiering af database ²																																				
Rengøring af I-CORE med I-CORE-rengøringsbørste ¹																																				
Teknikerens initialer (to bogstaver)																																				

1. Se den detaljerede procedure i kapitel 9 (Service og vedligeholdelse) i betjeningsvejledningen.

2. Se den detaljerede procedure i kapitel 5 (Brugsanvisning) i betjeningsvejledningen.

Disse anbefalinger er minimum for rengøring. Din institution kan kræve, at der udføres vedligeholdelse hyppigere.