

Registro de mantenimiento del sistema GeneXpert®

Mes y año:

Fecha de la última

comprobación de calibración:

Fecha de instalación por el

especialista de aplicaciones de campo:

Nombre del centro

Número de serie de GeneXpert

Instrucciones: 1. Introduzca el nombre de su centro, el número de serie de GeneXpert, el mes y el año actuales, la fecha de la última comprobación de la calibración y la fecha de instalación por el FAS en los cuadros mostrados más arriba.

2. Para cada actividad de mantenimiento indicada a continuación, seleccione las casillas bajo el día del mes en el que se realizaron las actividades e introduzca sus iniciales (2 caracteres como máximo) en la última fila.

3. Guarde el registro después de introducir los datos. Recomendamos guardar un archivo cada mes para disponer de un registro completo de las actividades

Mantenimiento diario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpiar el área de trabajo																															
Cerrar todas las puertas de los módulos																															
Desechar los cartuchos usados																															
Mantenimiento semanal																															
Apagar el ordenador y el instrumento GeneXpert ¹																															
Limpiar los prefiltros de los ventiladores ¹																															
Mantenimiento mensual																															
Almacenar las pruebas ²																															
Purgar las pruebas ²																															
Mantenimiento trimestral																															
Limpiar el vástago del émbolo y los compartimentos de los cartuchos ¹																															
Limpiar las superficies del instrumento ¹																															
Cambiar los filtros de los ventiladores ¹																															
Cambiar los prefiltros de los ventiladores ¹																															
Mantenimiento anual																															
Realizar el mantenimiento anual del instrumento ¹																															
Según corresponda																															
Imprimir el informe de registro del sistema ¹																															
Hacer una copia de seguridad de la base de datos ²																															
Limpiar el I-CORE con el cepillo del I-CORE ¹																															
Iniciales del técnico (dos letras)																															

1. Consulte el capítulo 9 (Servicio y mantenimiento) del manual del operador para conocer el procedimiento detallado.

2. Consulte el capítulo 5 (Instrucciones de funcionamiento) del manual del operador para conocer el procedimiento detallado.

Estas son las recomendaciones mínimas para la limpieza. El centro puede requerir que el mantenimiento se lleve a cabo con más frecuencia.

Referencia: Manual del operador del sistema GeneXpert con pantalla táctil (n.º de referencia 302-8378-ES, Rev. C)

