

# Süsteemi GeneXpert® hoolduslogi

Kuu ja aasta:

Viimase kalibreerimiskontrolli

Installation Date:

Asutuse nimi

GeneXperti seerianumber

- Juhised:: 1. Sisestage ülal olevatele väljadele asutuse nimi, GeneXperti seerianumber, praegune kuu ja aasta, viimase kalibreerimiskontrolli kuupäev ning paigaldamise kuupäev.  
 2. Märkige iga allpool loetletud hooldustoiming linnukesega toimingu kuupäeva ruudus ja lisage alumisse ritta oma initsiaalid (kuni 2 tähte).  
 3. Pärast andmete sisestamist salvestage fail. Toimingute täielikuks registreerimiseks soovitame salvestada iga kuu ühe faili.

Igapäevane hooldus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tööala puhastamine																															
Kõigi mooduli luukide sulgemine																															
Kasutatud kassetide kõrvaldamine																															
<b>Nädalahooldus</b>																															
GeneXperti arvuti ja instrumendi väljalülitamine <sup>1</sup>																															
Ventilaatori eelfiltrite puhastamine <sup>1</sup>																															
<b>Kuuhooldus</b>																															
Testide arhiivimine <sup>2</sup>																															
Testide andmebaasist eemaldamine <sup>2</sup>																															
<b>Kvartalihooldus</b>																															
Kolvivarda ja kassetilahtrite puhastamine <sup>1</sup>																															
Instrumendi pindade puhastamine <sup>1</sup>																															
Ventilaatori filtrite vahetamine <sup>1</sup>																															
<b>Aastahooldus</b>																															
Intrumendi hoolduse aastakontroll <sup>1</sup>																															
<b>Vajaduse korral</b>																															
Süsteemilogi aruande printimine																															
I-CORE puhastamine I-CORE'i puhastusharjaga <sup>1</sup>																															
Andmebaasi varundamine <sup>2</sup>																															
Tehniku initsiaalid (kaks tähte)																															

- Üksikasjalikku protseduuri vt Operaatorijuhendi 9. peatükist (Teenindus ja hooldus).
- Üksikasjalikku protseduuri vt Operaatorijuhendi 5. peatükist (Kasutusjuhised).

Minimaalne soovituslik puhastus. Teie asutuses võidakse nõuda, et hooldustöid tehakse sagedamini.

Viide: GeneXpert GX Dx-i operaatorijuhend (P/N 302-8378-ET, Red C)