

# GeneXpert® Log Pemeliharaan Sistem

Bulan dan Tahun:

Tanggal Pemeriksaan Kalibrasi Terakhir:

Tanggal Pemasangan:

Nama Institusi

Nomor Seri GeneXpert

Petunjuk:

1. Masukkan nama institusi Anda, Nomor Seri GeneXpert, Bulan dan Tanggal saat ini, tanggal Pemeriksaan Kalibrasi Terakhir, dan Tanggal Pemasangan di kolom di atas.
2. Untuk setiap aktivitas pemeliharaan yang tercantum di bawah, centang kotak di bawah tanggal pada bulan dilakukannya aktivitas tersebut dan masukkan inisial Anda (maksimal 2 karakter) dalam baris paling bawah.
3. Simpan file setelah memasukkan data. Kami menyarankan untuk menyimpan satu file setiap bulan untuk catatan data aktivitas lengkap.

<b>Pemeliharaan Harian</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Bersihkan area kerja																																
Tutup semua pintu modul																																
Buang kartrid bekas																																
<b>Pemeliharaan Mingguan</b>																																
Matikan komputer dan instrumen GeneXpert <sup>1</sup>																																
Bersihkan Prefilter Kipas <sup>1</sup>																																
<b>Pemeliharaan Bulanan</b>																																
Arsipkan uji <sup>2</sup>																																
Buang uji <sup>2</sup>																																
<b>Pemeliharaan Triwulanan</b>																																
Bersihkan batang plunger dan ceruk kartrid <sup>1</sup>																																
Bersihkan permukaan peralatan <sup>1</sup>																																
Ganti Filter Kipas <sup>1</sup>																																
Ganti prefilter kipas <sup>1</sup>																																
<b>Pemeliharaan Tahunan</b>																																
Periksa pemeliharaan tahunan peralatan <sup>1</sup>																																
<b>Sesuai Kebutuhan</b>																																
Cetak laporan log sistem <sup>1</sup>																																
Cadangkan basis data <sup>2</sup>																																
Bersihkan I-CORE menggunakan kuas I-CORE <sup>1</sup>																																
Inisial Teknisi (Dua Huruf)																																

1. Lihat Bab 9 (Servis dan Pemeliharaan) di Panduan Operator untuk prosedur terperinci.
  2. Lihat Bab 5 (Petunjuk Pengoperasian) di Panduan Operator untuk prosedur terperinci.
- Ini adalah rekomendasi minimum untuk pembersihan. Institusi Anda dapat mensyaratkan agar pemeliharaan dilakukan lebih sering.

Referensi: Panduan Operator GeneXpert (P/N 302-8378-ID, Rev. C)