

Jurnalul de întreținere a sistemului GeneXpert®

Luna și anul:

Data ultimei verificări a calibrării:

Data instalării:

Denumirea instituției

Numărul de serie GeneXpert

Instrucțiuni:

1. Introduceți în câmpurile de mai sus denumirea instituției dvs., numărul de serie GeneXpert, luna și anul curente, data ultimei verificări a calibrării și data instalării.
2. Pentru fiecare activitate de întreținere enumerată mai jos, bifați caseta (casetele) din ziua lunii în care au fost efectuate activitățile și introduceți inițialele dvs. (maximum 2 caractere) în rândul de jos.
3. Salvați fișierul după introducerea datelor. Vă recomandăm să salvați un fișier în fiecare lună pentru o înregistrare completă a activităților.

Întreținere zilnică	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Curățați zona de lucru																															
Închideți toate ușile modului																															
Eliminați cartușele utilizate																															
Întreținere săptămânală																															
Oprii instrumentul GeneXpert ¹ și computerul ¹																															
Curățați prefiltrul ventilatorului ¹																															
Întreținere lunară																															
Arhivați testele ²																															
Purjați testele ²																															
Înlocuiți filtrele ventilatorului ¹																															
Înlocuiți prefiltrul ventilatorului ¹																															
Întreținere trimestrială																															
Curățați tija pistonului și compartimentele cartușului ¹																															
Curățați suprafețele instrumentului ¹																															
Întreținere anuală																															
Verificați întreținerea anuală a instrumentului ¹																															
După cum este necesar																															
Imprimați raportul jurnal al sistemului ¹																															
Efectuați o copie de rezervă a bazei de date ²																															
Curățați I-CORE folosind peria de curățare I-CORE																															
Inițialele tehnicianului (două litere)																															

1. Consultați Capitolul 9 (Service și întreținere) din Manualul de utilizare pentru procedura detaliată.
 2. Consultați Capitolul 5 (Instrucțiuni de utilizare) din Manualul de utilizare pentru procedura detaliată.
- Acestea sunt recomandări minime pentru curățare. Instituția dvs. poate solicita efectuarea mai frecventă a operațiunilor de întreținere.

Referință: Manualul de utilizare GeneXpert GX Dx (302-8378-RO, Rev. C)